


Voimakas ylipurenta ja Somnipax Guard -kuorsauskiskon käyttö

Jos sinulla on voimakas ylipurenta, voi olla, että Somnipax Guard -kuorsauskiskon mukana tulevat säätöpannat ovat liian lyhyitä. Pantojen avulla säädetään sitä, kuinka paljon alaleuka työntyy eteenpäin. Jos alaleuka on luonnostaan todella takana, ei pisinkään säätöpanta saa työnnettyä leukaa niin pitkälle eteen, että kuorsauskiskon käyttö olisi edelleen miellyttävää.

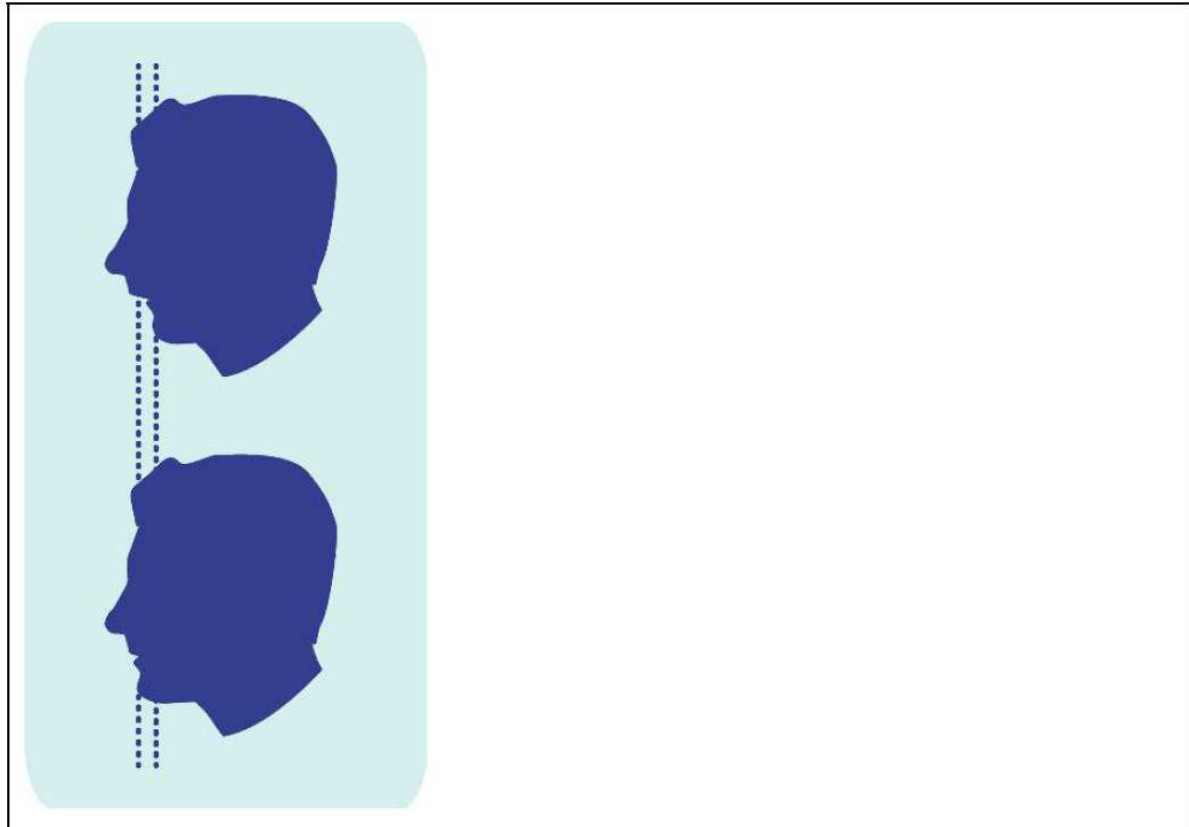

Somnipax Guard -kuorsauskiskoa käyttämällä ongelma on kuitenkin helppo ratkaista. Ota säätöpanta numero 6 (pisin panta) käteen, ja leikkaa se alla olevan kuvan mukaisesti osiin. Näin saat kaksi erillistä pantaa, jotka kiinnität normaalisti Somnoguard kuorsauskiskoon, kuten jälkimmäisessä kuvassa. Nyt pannat ovat erityisen pitkiä ja vaikuttavat siten, että leuka työntyy maltillisesti eteenpäin. Ratkaisu on optimaalinen voimakkaasta ylipurennasta kärsiville.

