

KIIREELLINEN turvallisuusilmoitus laitteen käyttäjille

**Philips Respironics – Sleep and Respiratory Care
Ilmoitus potilaille**

**Vähäkontaktinen Amara View -nenä-suumaski
DreamWear-nenä-suumaski
Nenäpehmusteella varustettu DreamWisp-nenämaski
Wisp-nenämasket ja Wisp Youth -nenämasket
Therapy 3100 NC/SP maskit**

29. elokuuta 2022

Tässä asiakirjassa on tärkeitä tietoja laitteen jatkuvasta turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä

- Ilmoita seuraavat tiedot kaikille asiaankuuluville henkilökunnan jäsenille. Asiakirjan sisältämien tietojen seuraamusten ymmärtäminen on tärkeää.
- Säilytä kopio laitteen käyttöohjeen kanssa.

Hyvä potilas

Seuraavat potilaskäyttöön tarkoitetut Philips Respironics -tuotteet (nenä-suumasket ja nenämasket) sisältävät magneetteja: vähäkontaktinen Amara View -nenä-suumaski, DreamWear-nenä-suumaski, nenäpehmusteella varustettu DreamWisp-nenämaski, Wisp-nenämasket, Wisp Youth -nenämasket ja 3100 NC/SP -hoitomaski.

Philips Respironics aikoo tehdä nykyisiin vasta-aiheisiin ja vakaviin varoituksiin seuraavat päivitykset:

Vasta-aihe: Maskin käyttö on vasta-aiheista potilaille ja saman talouden jäsenille, hoitajille ja vuodekumppaneille, jotka voivat olla maskia käyttävien potilaiden lähellä, jos heillä on implantoituja laitteita, joihin magneetit voivat vaikuttaa.

Näihin laitteisiin kuuluvat muun muassa

- sydämentahdistimet
- rytmihäiriötahdistimet (ICD)
- hermostimulaattorit
- magneettiset metalli-implantit/elektrodit/venttiilit, jotka sijaitsevat yläraajoissa, keskivartalossa tai ylempänä (eli kaulassa tai päässä)
- aivo-selkäydinnestesuntit (CSF) (esim. ventrikuloperitoneaalinen [VP] suntti)
- aneurysmaklipsit
- emboliakoilit
- kallonsisäisen aneurysman suonensisäiset virtauksen katkaisulaitteet
- metalliset kallolevyt, ruuvit, porausaukkojen peitteet ja luun korvauslaitteet
- metallisirut silmässä
- silmäimplantit (esim. glaukoomaimplantit ja retinaimplantit)
- tietyt piilolinssit, joissa on metallia
- kuulon tai tasapainon palauttamiseen tarkoitetut implantit, joissa on implantoitu magneetti (kuten sisäkorvaimplantit, implantoidut luujohtumiseen perustuvat kuulolaitteet ja aivorunkoon asennetut kuuloimplantit)
- magneettiset hammasproteesien kiinnikkeet
- metalliset suolistoklipsit
- metalliset stentit (esim. aneurysma-, sydän-, keuhkoputki- ja sappiestentit)
- implantoitavat portit ja pumput (esim. insuliinipumput)
- kielen alapuoliset hermostimulaattorit
- laitteet, jotka on merkitty ei-turvallisiksi magneettikuvausympäristössä (MR)
- magneettiset metalli-implantit, joilla ei ole MR-merkintää tai joiden turvallisuutta magneettikentässä ei ole arvioitu

Vakava varoitus: Maskit sisältävät magneetteja, joiden muodostaman magneettikentän voimakkuus on 400 mT. Paikallisten magneettikenttien mahdollisesti aiheuttamien haittojen välttämiseksi pidä maski aina vähintään 15,24 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä kaikista muista lääkinällisistä implanteista tai lääkinällisistä laitteista, joiden toimintaan magneettikentät voivat vaikuttaa. Tämä ei koske vasta-aiheessa mainittuja laitteita. Tämä koskee myös potilaiden kanssa samassa taloudessa asuvia, hoitajia ja vuodekumppaneita, jotka voivat olla maskia käyttävien potilaiden lähellä.

1. Mikä on ongelmana ja missä tilanteessa se voi ilmetä

- Maskit, joita ongelmaa koskee, sisältävät magneetteja, jotka voivat vaikuttaa magneettikentille herkkien lääkinällisten implanttien tai laitteiden toimintaan ja/tai saada ne liikkumaan paikaltaan.
- Lisätietoja on tämän ilmoituksen kohdissa Vasta-aihe ja Vakava varoitus.

2. Millainen vaara/haitta ongelmaan liittyy

- Mikäli maskin magneetit tuodaan alle 15,24 cm:n (6 tuuman) etäisyydelle metalli-implantista tai -laitteesta, magneetit voivat aiheuttaa laitteen poikkeavaa toimintaa, josta voi seurata vakavia vammoja. Tämä ei koske vasta-aiheessa mainittuja laitteita.
- On tehty neljätoista (14) ilmoitusta, joiden mukaan potilaat arvelevat maskin magneettien vaikuttaneen lääkinällisiin laitteisiinsa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: tahdistimen toiminnan muuttuminen, tahdistimen toimintahäiriö ja siitä johtuva vaihtaminen, suntin säätämisen tarve, rytmihäiriötahdistimen (AICD) nollautuminen, kouristuskohtaukset, defibrillaattorin ajoittainen sammuminen, rytmihäiriöt, epäsäännöllinen verenpaine, sykkeen muutokset ja kognitiiviset ongelmat.

3. Muutostyön alaiset tuotteet ja niiden tunnistaminen

Ohessa on kuvat maskeista, joita tämä ilmoitus koskee. Maskien pääemmin magneettikiinnikkeet on ympyröity. Näiden kuvien avulla voit selvittää, onko potilaasi käyttämässä maskissa magneettiset pääemmin kiinnikkeet. Nämä maskit on tarkoitettu CPAP- tai kaksitasohoidon potilasliitännöiksi. Kuvassa 6 on lueteltu niiden magneetteja sisältävien maskien ja maskin osien osanumerot, joita tämä ilmoitus koskee.



Kuva 1:
Amara View
-nenä-
suumaski



Kuva 2:
DreamWisp-
nenämaski



Kuva 3:
DreamWear
-nenä-
suumaski



Kuva 4:
Wisp- ja
Wisp Youth -
nenämaskit



Kuva 5:
3100 NC/SP
-hoitomaski

4. Potilaan toimenpiteet riskien pienentämiseksi

Näitä maskeja käyttävien potilaiden on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

Sinun on tehtävä seuraavat toimet:

- 4.1. **LOPETA** tässä ilmoituksessa mainitun maskin käyttäminen, jos implantti / lääkinällinen laite on vasta-aihe magneettien käytölle. Potilaiden on keskusteltava viipymättä lääkärisä kanssa mahdollisuudesta vaihtaa hoitoon

käytettävä maski toiseen. Siirry sillä välin käyttämään ei-magneettista maskia, jos sellainen on saatavilla, jotta hoito ei keskeydy. Kun olet saanut toisen maskin, hävitä magneetteja sisältävä maski asianmukaisesti.

- 4.2. Jos sinulla ja taloudessasi asuvilla, hoitajillasi ja vuodekumppaneillasi, jotka voivat olla lähelläsi, ei ole implantoituja lääkinnällisiä laitteita tai metallisiruja silmässä, mitään toimenpiteitä ei tarvita.
- 4.3. Saman talouden jäsenten, hoitajien ja vuodekumppanien, joilla on lääkinnällisiä implantteja/laitteita, on varmistettava, että maski on aina vähintään 15,24 cm:n (6 tuuman) päässä heidän lääkinnällisistä implanteistaan/laitteistaan.
- 4.4. Lisätietoja ei-magneettisista maskeista saa Philips Respironicsin asiakaspalvelusta.

5. Philipsin suunnittelemat korjaustoimet

Philips Respironics päivittää nykyiset vasta-aihe- ja vakava varoitus -tekstit tämän turvallisuusilmoituksen mukaisiksi.

6. Jos haluat asiasta lisätietoja tai tukea, ota yhteys myyjään/ palveluntarjoajaan tai paikalliseen Philips Respironics - asiakaspalveluun:

Yleisten tiedustelujen osalta voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelun ratkaisukeskukseen (09-61580400 #1).

Tämä ongelma on ilmoitettu asiaankuuluville virastoille. Tämän tuotteen käytön yhteydessä ilmenneistä haittavaikutuksista voi ilmoittaa joko Philipsille tai paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle Fimea. Philips Respironics pahoittelee tästä ongelmasta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin

Thomas Fallon
Head of Quality Assurance
Philips Respironics

Laitteet, joita tämä ongelma koskee – kuva 6:

Vähäkontaktinen Amara View -nenä-suomaski	
Osanro	Kuvaus
1090602	S Amara View -maski, pääremmi
1090603	M Amara View -maski, pääremmi
1090604	L Amara View -maski, pääremmi
1090622	S Amara View -maski, pääremmi, vain USA
1090623	M Amara View -maski, pääremmi, vain USA
1090624	L Amara View -maski, pääremmi, vain USA
1090641	XS Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090642	S Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090643	M Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090644	L Amara View -maski, pääremmi, JPN
1090651	XS Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090652	S Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090653	M Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090654	L Amara View -maski SE, pääremmi, JPN
1090662	S Amara View -maski, pääremmi, KV
1090663	M Amara View -maski, pääremmi, KV
1090664	L Amara View -maski, pääremmi, KV
1090670	Amara View -maski, pääremmi, sovituspakkaus
1090696	Amara View -pääremmi, varaosa, L
1090697	Amara View -pääremmi, varaosa, vakio
1135080	S AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI
1135081	M AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI
1135082	L AMARA VIEW -MASKI SE, PÄÄREMMI
1136626	Amara View -magneettikiinnike
1090670RTL	AMARA VIEW -MASKI, PÄÄREMMI, SOVITUSPAKKAUS, VÄH.MYYNTI
1136626RTL	Amara View -nenä-suomaskin magneettikiinnikkeet

DreamWear-nenä-suomaski

Wisp- ja Wisp Youth -nenämaskit	
Osanro	Kuvaus
1094050	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1094051	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, MAGNEETTIKIINNIKKEET, VAIN USA
1094053	WISP-MASKI, USA, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI
1094060	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, KV
1094061	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, KV
1094062	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, KV SE
1094070	WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, JPN SE
1094071	P, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1094072	S/M, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1094073	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, JPN
1109298	WISP YOUTH -MASKI, KANGAS, MAGNEETTIKIINNIKKEET, VAIN USA
1113954	XL, Wisp-maski, kangasrunko, pääremmi, JPN
1117119	MW, Wisp-maski, kangasrunko, pääremmi, JPN
1118060	P, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118061	S/M, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118062	L, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118063	XL, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118064	P, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118065	S/M, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118066	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1118067	XL, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, VAIN USA
1120434	Pääremmin magneettinen Wisp/DreamWisp-kiinnike, varaosa
1137360	Wisp-laboratorionenämaski, kangasrunko, vain USA
1137361	Wisp-laboratorionenämaski, väritön runko, vain USA
1137366	S/M, Wisp-laboratoriomaski, kangasrunko, vain USA
1137367	L, Wisp-nenämaski, kangasrunko, vain USA
1137368	S/M, Wisp-nenämaski, väritön runko, vain USA
1137369	L, Wisp-nenämaski, väritön runko, vain USA
1137370	YHDISTELMÄPAKKAUS, WISP-LABORATORIOMASKI, VAIN USA

Osanro	Kuvaus
1133344	S, DreamWear UTN -nenä-/nenä-suomaski, yhdistelmäpakkaus
1133345	M, DreamWear UTN -nenä-/nenä-suomaski, yhdistelmäpakkaus
1133370	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KV
1133371	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KV
1133372	L, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KV
1133373	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot
1133375	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL
1133376	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL
1133377	L, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL
1133378	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, GBL
1133380	S, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi, GBL
1133381	M, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi
1133382	L, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi
1133383	MW, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi
1133385	S, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi, GBL
1133386	M, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi
1133387	L, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi, GBL
1133388	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi,
1133390	S, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, GBL
1133391	M, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, GBL
1133392	L, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi, GBL
1133393	MW, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi
1133395	DreamWear-nenä-suomaski, esittelypakkaus
1133400	Sovituspakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko
1133401	DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133405	S, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä
1133406	M, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä
1133407	L, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei pääremmiä

1138989	P, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, 1118060
1138991	L, WISP-MASKI, VÄRITÖN, PÄÄREMMI, VAIN USA, 1118062
1138992	XL, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI,1118063
1138993	P, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, 1118064
1138994	S/M, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI,1118065
1138995	L, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, 1118066
1138996	XL, WISP-MASKI, KANGASRUNKO, PÄÄREMMI, 1118067
1139009	S/M, WISP-MASKI, VÄRITÖN RUNKO, PÄÄREMMI, 1118061
1094051RTL	WISP-MASKI, KANGASRUNKO, MAGNEETTIKIINNIKKEET, VAIN USA, VÄH.MYYNTI
1148366	DreamWisp/Wisp-magneettikiinnikkeet, väh.myynti

Nenäpehmusteella varustettu DreamWisp-nenämaski	
Osanro	Kuvaus
1137916	Sovituspakkaus, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137918	Sovituspakkaus, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137921	Sovituspakkaus, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137922	P, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137923	S, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137924	M, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137925	L, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137926	XL, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, ei pääremmiä, GBL
1137927	P, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137928	S, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137929	M, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137930	L, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137931	L, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, GBL
1137932	P, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137933	S, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL

1133408	MW, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, ei
1133410	S, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä
1133411	M, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä
1133412	L, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä
1133413	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, ei pääremmiä
1133415	S, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133416	M, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä
1133417	L, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä, GBL
1133418	MW, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, ei pääremmiä
1133423	S/M, DreamWear-nenä-suomaski, S-koon runko, pääremmi
1133424	S/M, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi
1133425	S/M, DreamWear-nenä-suomaski, L-koon runko, pääremmi
1133427	W, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi
1133430	S, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133431	M, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133432	L, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133433	MW, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133434	SW, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa
1133435	S, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa, JPN
1133436	M, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa, JPN
1133438	W, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa, JPN
1133450	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, varaosa
1133454	Pääremmin magneettiliitin, varaosa
1135275	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot
1135276	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot
1135277	SW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot
1135278	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot
1135327	S, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KR
1135388	M, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KR

1137934	M, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137935	L, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137936	XL, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, GBL
1137937	P, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137938	S, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137939	M, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137940	L, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137941	XL, DreamWisp-NENÄMASKI, S-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, KV
1137942	P, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137943	S, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137944	M, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137945	L, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137946	XL, DreamWisp-nenämaski, M-koon liitin, pääremmi, KV
1137947	P, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137948	S, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137949	M, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137950	L, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137951	XL, DreamWisp-nenämaski, S-, M-, L-koon liittimet, pääremmi, JPN
1137953	LABPK DreamWisp, LIITTIMET S/M/L, PEHMUSTE, PÄÄREMMI
1137954	P/XL LABPK DreamWisp, LABORATORIOPAKKAUS, S/L-liitin
1137955	DreamWisp, laboratorionpakkaus, yhdistelmä
1137964	DreamWisp-PÄÄREMMI, varaosa
1137965	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, varaosa
1137966	DreamWisp, RS-PÄÄREMMI, varaosa
1139332	P, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139333	S, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139334	M, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139335	L, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR
1139336	XL, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, KR

1135389	SW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot, KR
1135390	MW, DreamWear-nenä-suomaski, S- ja M-koon rungot
1137430	Sovituspakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, M-koon runko
1137431	Monipakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio
1137437	S, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, M-koon runko
1137438	S, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, S-koon runko
1137439	M, DreamWear-nenä-suomaski, laboratorio, M-koon runko
1137440	YHDISTELMÄPAKKAUS, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKI, LABORATORIO
1140235	S, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko, pääremmi
1143130	Sovituspakkaus, DreamWear-nenä-suomaski, M-koon runko
1144347	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, laboratorio, varaosa
1146593	S, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146594	M, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146595	L, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146596	MW, DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, varaosa - väh.myynti
1146597	DreamWear-nenä-suomaskin pääremmi, varaosa - väh.myynti
1148363	DreamWear-nenä-suomaskin magneettikiinnike, väh.myynti
1133375RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, S-koko
1133376RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, M-koko
1133377RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, L-koko
1133378RTL	DreamWear-nenä-suomaskipakkaus, M-koon pehmuste
1133430RTL	S, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, varaosa - väh.myynti
1133431RTL	M, DREAMWEAR-NENÄ-SUUMASKIN PEHMUSTE, varaosa - väh.myynti
1133432RTL	DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, L-koko
1133433RTL	DreamWear-nenä-suomaskin pehmuste, M-koko

Therapy 3100 NC/SP	
1144608	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi

1144344	DreamWisp, RS-PÄÄREMMI, laboratorio, varaosa
1144345	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, laboratorio, varaosa
1144346	DreamWisp-PÄÄREMMI, laboratorio, varaosa
1144502	Sovituspakkaus, DreamWisp, USA
1148409	DreamWisp-pääremmi, (RS) - väh.myynti
1148410	DreamWisp-PÄÄREMMI, varaosa - väh.myynti
1148411	DreamWisp, L-KOON PÄÄREMMI, varaosa - väh.myynti
1148913	P, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148914	S, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148915	M, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148916	L, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1148917	XL, DreamWisp-nenämaski, S- ja M-koon liittimet, pääremmi, CN
1137942AP	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137942CE	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137942RC	P, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137943AP	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137943CE	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137943RC	S, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137944AP	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137944CE	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137944RC	M, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137945AP	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137945CE	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137945RC	L, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137946AP	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, AP
1137946CE	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, CE
1137946RC	XL, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, RC
1137916RTL	SOVITUSPAKKAUS, DREAMWISP-NENÄMASKI, M-KOON LIITIN, PÄÄREMMI, VÄH.MYYNTI

1144610	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145038	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145039	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145040	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145041	3100 NC -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145044	XS, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145045	S, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145046	M, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145047	L, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145048	MW, 3100 NC -hoitomaski, ei pääremmiä
1145049	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145050	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145051	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145052	3100 SP -hoitomaski, sovituspakkaus, pääremmi
1145055	XS, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145056	S, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145057	M, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145058	L, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä, GBL
1145059	MW, 3100 SP -hoitomaski, ei pääremmiä
1145060	3100 NC-SP -hoitomaski, esittelypakkaus
1145061	3100 NC -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, yksittäinen
1145062	3100 SP -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, yksittäinen
1145063	3100 NC-SP -hoitomaski, laboratorion yhdistelmäpakkaus
1145064	XS, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145065	S, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145066	M, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145067	L, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145068	MW, 3100 NC -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145069	XS, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145070	S, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa

1145071	M, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145072	L, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145073	MW, 3100 SP -hoitomaski, pehmuste, varaosa
1145074	3100 NC-SP -hoitomaski, runko, varaosa
1145459	XS, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145460	S, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145461	M, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145462	MW, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145463	L, 3100 NC -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145464	XS, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145465	S, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145466	M, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145467	MW, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145478	L, 3100 SP -hoitomaski, pääremmi, GBL
1145916	3100 NC -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, GBL
1145917	3100 SP -hoitomaski, laboratorion sovituspakkaus, GBL