

Löwenstein Medical

kalkinpoistoaine (tiiviste)



Ammattikäyttöönkin sopiva kalkinpoistaja amidosulfonihapolla

- Jopa 3x riittoisampi
- Jopa 6x tehokkaampi
- Jopa 8x nopeampi

... kuin tavalliset sitruunahappopohjaiset tuotteet

Sisältö:
500 ml

Ainesosat EY:n asetuksen 648/2004 mukaisesti pesuaineista:
<5% fosfonaatteja

Käyttö:

Laimenna tiivistettä vedellä kalkin määrästä riippuen suhteessa 1:5 - 1:10. Suorita kalkinpoisto valmistajan suosituksen mukaisesti. Huuhtelee lopuksi vedellä.

Huomioitavaa:

Noudata laitteen valmistajan antamia kalkinpoisto-ohjeita. Vältä kosketusta hapolle herkkien pintojen (esim. emali, alumiini, marmori) kanssa. Tuotteen soveltuvuus on aina testattava huomaamattomaan kohtaan ennen käyttöä. Väärinkäyttö mitätöi vastuun mahdollisista vahingoista. Suojaa pakkaselta.

Varoitukset:

H315 Aiheuttaa ihoärsytystä.

H319 Aiheuttaa voimakasta ärsytystä silmissä.

P102 Pidä poissa lasten ulottuvilta.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/suojalaseja.

P302+P352 JOS TUOTE ON KOSKETUKSESSA IHOON: Huuhdo runsaalla vedellä.

P332+P313 Ihoärsytyksen ilmaantuessa ota yhteyttä lääkäriin.

P305+P351+P338 JOS TUOTE ON KOSKETUKSESSA SILMIIN: Huuhdo runsaalla vedellä muutaman minuutin ajan. Poista tarvittaessa piilolinssit, jatka huuhtelua vedellä.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valmistaja: HOTREGA GmbH, Lorenz-Weber-Straße 2, 36364 Bad Salzschlirf,
info@hotrega.de